

## Οδηγός Εγκατάστασης

### Βήμα 1

Έχοντας εισάγει το DVD στον υπολογιστή, μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα εμφανισθεί ένα παράθυρο.

Πατήστε το κουμπί “Database” για να εγκατασταθεί η βάση δεδομένων.

### Βήμα 2

Εφόσον έχει εγκατασταθεί επιτυχώς η βάση δεδομένων, πατήστε το κουμπί OK που εμφανίζεται στο αντίστοιχο παράθυρο.

Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί “Installation” για να εγκατασταθεί το πρόγραμμα.

### Βήμα 3

Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί “Next” («Επόμενο»).

### Βήμα 4

Στο επόμενο βήμα, πατήστε ξανά το κουμπί “Next” για να εγκατασταθεί το πρόγραμμα στο φάκελο

“C:\Program Files\RehaCom5.

Σημείωση: Εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα σε διαφορετικό φάκελο (δεν προτείνεται), πατήστε το κουμπί “Browse” (δηλ., «Εξευρένηση») και διαλέξτε το φάκελο προορισμού. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί “Next”.

### Βήμα 5

Από τις μεθόδους εγκατάστασης που θα εμφανιστούν, παρακαλώ επιλέξτε τη “Standard” και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί “Next”.

### Βήμα 6

Στο επόμενο βήμα, πατήστε το κουμπί “Next”.

### Βήμα 7

Το επόμενο βήμα είναι το τελευταίο και δηλώνει ότι έχετε εγκαταστήσει επιτυχώς το πρόγραμμα.

Για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας, επιλέξτε την πρώτη επιλογή, ενώ για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση χωρίς να γίνει επανεκκίνηση (προτείνεται), επιλέξτε την δεύτερη επιλογή.

Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί “Finish” («Ολοκλήρωση») για ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να φύγετε από τον οδηγό εγκατάστασης.