

Οδηγός Εγκατάστασης Άδειας Χρήσης

Βήμα 1

Επιλέξτε από τη γραμμή εργαλείων το menu "Σύστημα" και από εκεί την επιλογή "Τύπος άδειας"

Βήμα 2

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε "Άδεια χρήσης πληκτρολογίου ή USB dongle"

Βήμα 3

Θα εμφανιστεί παράθυρο διαλόγου που θα σας ζητήσει να συνδέσετε τη συσκευή USB dongle ή το ειδικό πληκτρολόγιο RehaCom που λάβατε.

Βήμα 4

Αφού εντοπιστεί η συσκευή που μόλις συνδέσατε από το λογισμικό, επιλέξτε το menu "Σύστημα" και την επιλογή "Άδεια".

Βήμα 5

Στο παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί επιλέξτε το κουμπί "Αρχείο με Κωδικό".

Βήμα 6

Αναζητήστε το αρχείο της άδειας που λάβατε (rehacode.inf).

Βήμα 7

Η εγκατάσταση της άδειάς σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς.